

# BRUKSANVISNING

## FÖR TALFÖRSTÄRKARE

### FLEXITAL-2 MKII



---

**Postadress**

Xena Medical AB  
Industribyn  
360 43 Åryd

**Besöksadress**

Industribyn  
Åryd

**Telefon**

0470 - 774484

**Fax**

0470 - 774485

**E-mail /Hemsida**

conny@xenamedical.se  
www.xenamedical.se

# HANDHAVANDE

## FLEXITAL – i hemmet.

FLEXITAL är väl anpassad för hemmabruk. Räckvidden är tillräcklig för en normalstor lägenhet eller villa. Sändare och mottagare kan i de flesta fall placeras i skilda rum. Räckvidden reduceras beroende på material i väggarna. I vissa fall kan lysrör störa mottagningen flytta då mottagaren så att den ej störs .

## FLEXITAL – för lärare.

Utrustningen är mycket lämplig till lärare. Mottagaren placeras på lämpligt ställe i klassrummet. Är det stora lokaler kan flera högtalare anslutas för att få en bra hörbarhet.

I vissa fall kan lysrör störa mottagningen flytta då mottagaren så att den ej störs . FLEXITAL kan fås med olika frekvenser så att de ej stör i angränsande klassrum.

## FLEXITAL – för rullstolsbundna personer.

Mottagaren kan monteras på rullstol eller sjuksäng med en speciell hållare. Mottagaren kan lätt flyttas ur hållaren och placeras på exempelvis ett bord .

## MIKROFONER


Flexital levereras med nackset mikrofon. Se beskrivning justering av nackset mikrofon.

## FUNKTIONSTEST

- Anslut mikrofon till sändarens mikrofonuttag märkt MIC .
- Sätt sändarens on-off knapp i läge on
- Kontrollera att BATT LOW lysdioden lyser grönt på sändaren .
- Tänds BATT-LOW dioden ej eller lyser rött skall sändaren laddas
- Sätt Till-Från knappen på högtalarens baksidan i läge Till
- Justera volymen på sändaren till lämplig nivå
- Avståndet mellan mottagare och sändare bör vara 1-2 meter för att rundgång ej skall uppstå.
- Uppstår rundgång " tjut i högtalaren" minska volymen på sändaren Eller öka avståndet mellan sändare och högtalaren

## UNDERHÅLL

- Ladda sändare och mottagare ca 10-12 tim
- Blir mikrofonen kladdig av ex saliv torkas den av med En fuktig sprit eller disk trasa .
- Vid byte av batterier använd endast batterier levererade från Xena Medical .
- Det går att byta ut puffskyddet som sitter på den lilla mikrofonen

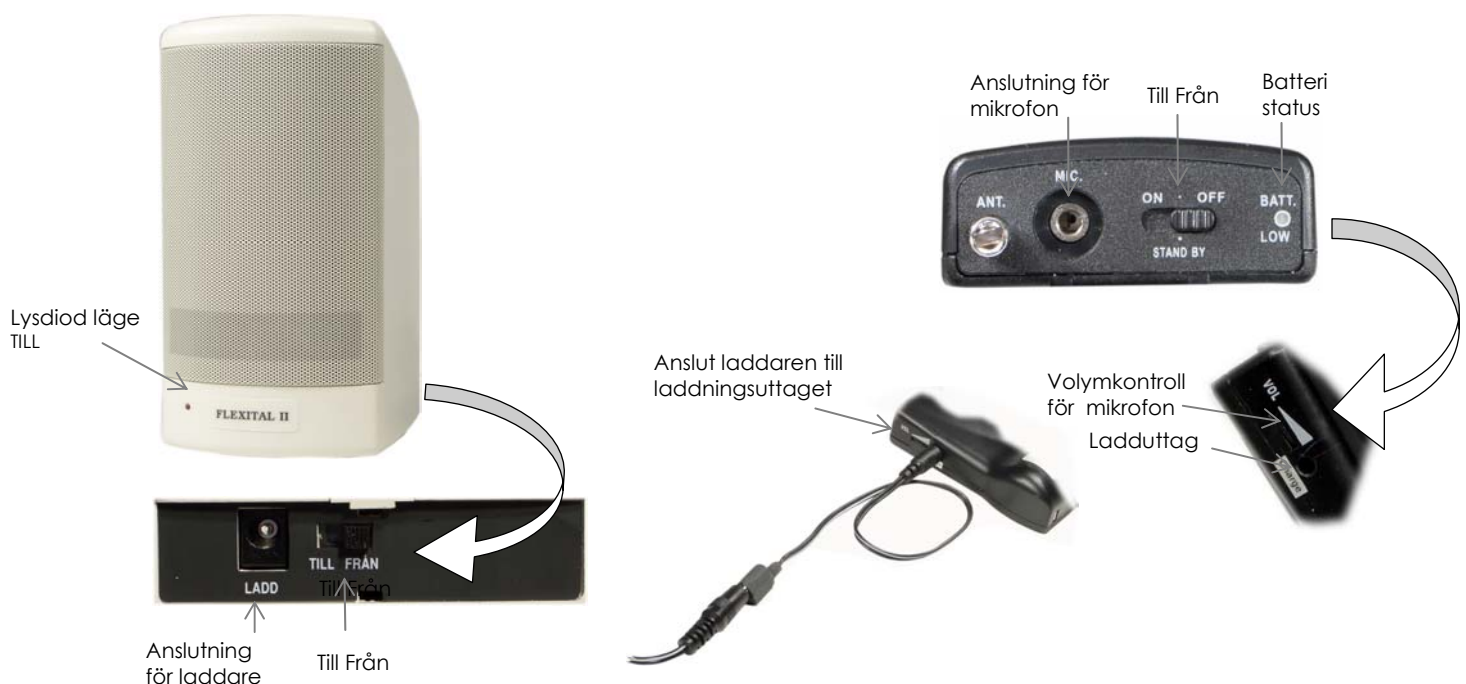



# Justering av nackset



Talförstärkaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr. Nacksetet går att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas.

Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det 3 olika storlekar stor, normal samt liten.

Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .

Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek , Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.



Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.

Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .

Bocka enligt figuren till vänster




passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till lämplig storlek , kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .



Det är viktigt att justera bågarna så att de ej klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar även tillsammans med glasögon



Mikrofonarmen är av flexyp och skall justeras så att mikrofonen sitter vid mungipan , sitter mikrofonen för nära munnen kan det uppstå det plåsljud när man talar .

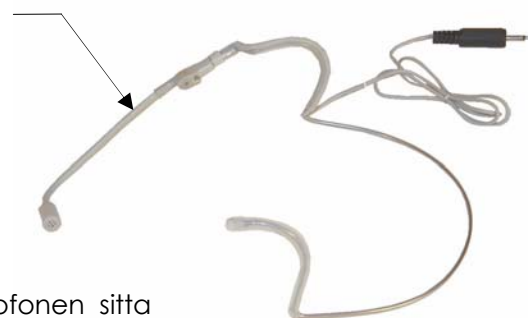

När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens placering är mycket viktig för bästa förstärkning av rösten skall erhållas

## BYTE AV BATTERIER

### SÄNDARE:

Öppna batteriluckan på sändarens baksida se beskrivning fig1.



Fig 1

### HÖGTALARE:

Öppna batteriluckan på Högtalarens baksida se beskrivning fig2.



Fig 2

OBS ! Använd alltid batterier som är levererade eller godkända av Xena Medical.

### TEKNISKA DATA:

Driftstid sändare mottagare	10 tim
Räckvidd i fria luften ca	100 meter
Frequensband	863-865 MHz
Uteffekt sändare	10 mW
Uteffekt Högtalare	5 Watt
Batteri sändare typ AA	2 st 1,3V NiMH
Batteri mottagare( högtalare )	1 st 7,3V NiMH
CE Märkt	enligt del 74 av FCC regler

### LEVERANTÖR:

Xena Medical AB  
Indusribyn  
360 43 ÅRYD

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485  
E Post: [conny@xenamedical.se](mailto:conny@xenamedical.se)  
Hemsida: [xenamedical.se](http://xenamedical.se)