


# Bruksanvisning för talförstärkare MMXT-2

## Så här använder ni talförstärkare MMXT-2

1. Ladda Talförstärkaren  
Se till att talförstärkaren är avstängd under laddningen.  
Stäng av talförstärkaren genom att sätta TILL/FRÅN-knappen i läge från
2. Anslut laddaren till kontakt märkt LADD.  
Batterierna bör laddas 12 – 14 timmar dock ej längre än 24 tim.  
Batterierna har en driftstid på ca 8 tim.
3. Sätt på talförstärkaren samt ställ in ljudvolymen med hjälp av ratten på apparatens framsida.
4. Vi rekommenderar att använda nacksetmikrofonen det är viktigt att mikrofonen kommer nära mungipan för bästa ljudupptagning, se instruktion på baksidan. Det bifogas även en handmikrofon.
5. För att undvika höga "tjut" i högtalaren s k rundgång, är det viktigt att ej hålla mikrofonen för nära högtalaren. Uppstår det ändå "tjut" i högtalaren minska volymen till dess att tjutet försvinner.
6. Använd bifogad förlängningssladd till mikrofonen

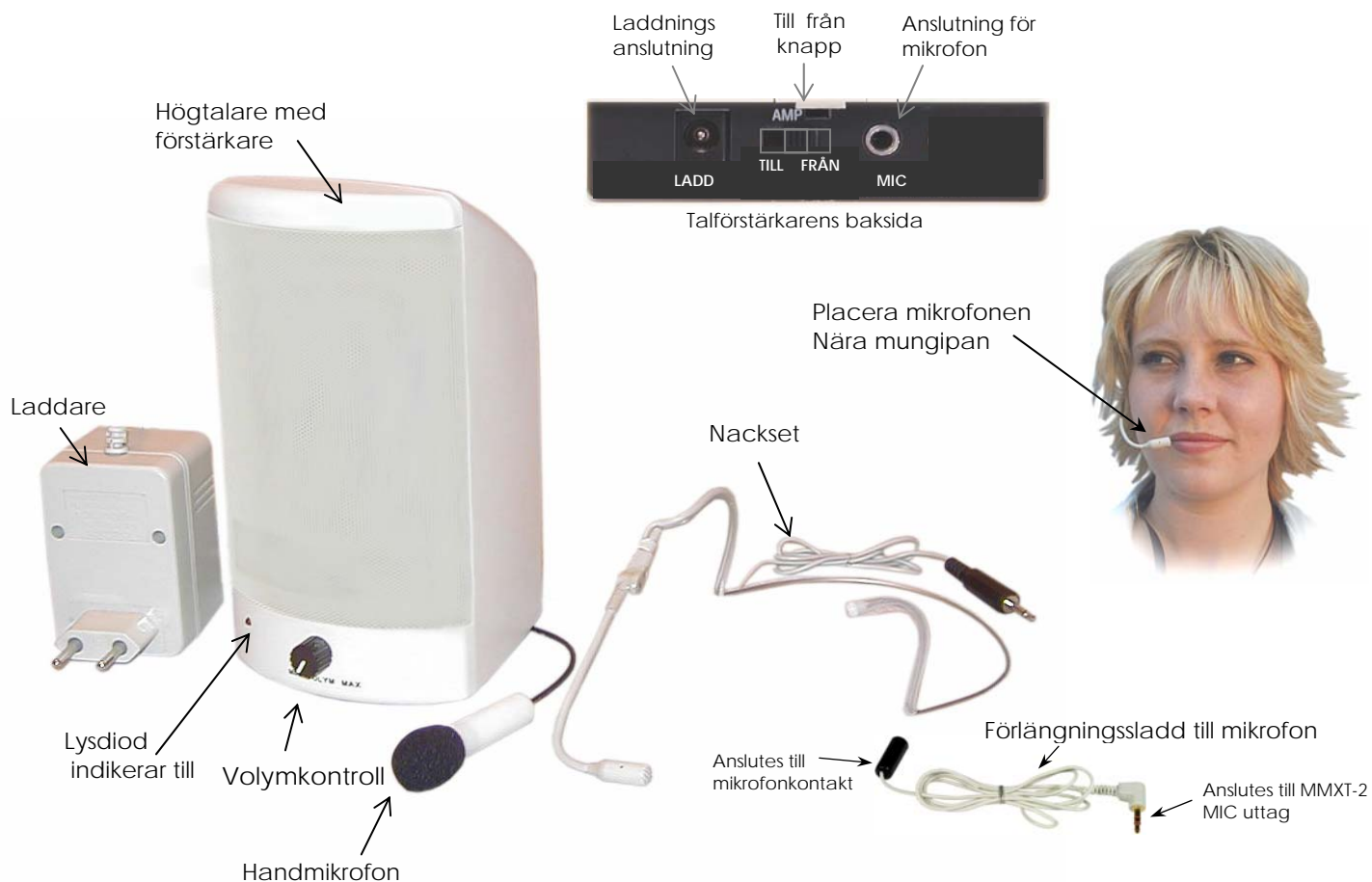

**Xena Medical AB**  
Industribyn  
36043 Åryd

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485  
E mail [conny@xenamedical.se](mailto:conny@xenamedical.se)  
Hemsida [www.xenamedical.se](http://www.xenamedical.se)