

Bruksanvisning för talförstärkare MMT-4

Så här använder ni talförstärkaren MMT-4

1. Ladda talförstärkaren.
Kontrollera att talförstärkaren är avstängd under laddningen.
Talförstärkaren stängs av genom att vrida volymratten till Vänster till det hörs ett knäppljud – MIN VOLYM




2. För längsta livslängd på batteriet bör det laddas 10-12 timmar
3. Batteriet har en drift tid på ca 8 tim
4. Sätt på talförstärkaren samt ställ in ljudvolymen på volymratten
5. Placera mikrofonen så nära mungipan som möjligt se instr på baksidan
6. Vid rundgång "tjut" i högtalaren minska volymen något
7. Vid behov kan mikrofonkabeln förlängas med förlängningsladd
8. Det går vid behov att haka av halsremmen från talförstärkaren

Mikrofonarmen är flexibel och kan Justeras för bästa anpassning

För bästa ljudupptagning skall micken vara så nära mungipan som möjligt.

Talförstärkarens halsband kan justeras med justerspänne på bandet

Talförstärkaren kan bäras under kläderna eller i byxlinningen med hjälp av klipset som sitter på baksidan Det går att haka av Bär remmen.

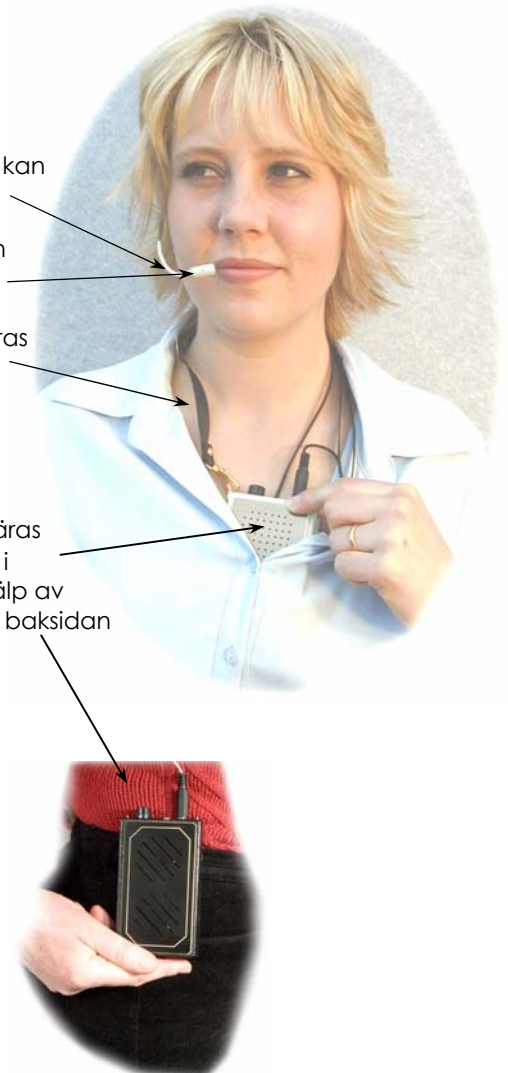



Justering av nackset



Talförstärkaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr .Nacksetet går att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas.

Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det 3 olika storlekar stor ,normal samt liten.

Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .

Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek , Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.



Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.

Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .

Bocka enligt figuren till vänster

passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till lämplig storlek , kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .



Det är viktigt att justera bågarna så att de ej klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar även tillsammans med glasögon



Mikrofonarmen är av flexityp och skall justeras så att mikrofonen sitter vid mungipan , sitter mikrofonen för nära munnen kan det uppstå det plåsljud när man talar .



När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens placering är mycket viktig för bästa förstärkning av rösten skall erhållas

