

RÖSTFÖRSTÄRKARE FLEXITAL-COMBI

Flexital-combi är ett trådlöst röstförstärkersystem.

Flexital-combi levereras komplett med hörlur, hörsnäcka, högtalare , nacksetmik, klädmik, sändare, mottagare. Mottagaren går att kombinera med högtalare eller hörlurar.

Mottagaren är liten och smidig att bära, ansluten till hörlurar eller hörsnäcka medför att man kan röra sig fritt i ex bostaden, räckvidden är ca 100 meter.

Mottagaren kan även anslutas till en högtalare med inbyggd förstärkare och laddningsbara batterier . Ansluts mottagaren till Hörlur går det bra att använda klädmikrofonen.

Komplett Flexital-combi.



Nacksetet är diskret och väger endast 13 gr, det kan enkelt justeras för bästa passform. Mikrofon armen är flexibel vilket medför att mikrofonen kan placeras nära mungipan för optimal ljudupptagning.



Det är enkelt att montera mottagaren på högtalaren.

Mottagaren har ett clips som passar i högtalarens fäste. Används högtalaren bör nacksetmikrofon användas för att bästa funktion skall uppnås.

Hörlur eller hörsnäcka anslutes enkelt till mottagaren.

Mottagaren har volymkontroll för justering av ljudvolymen i hörlurarna.



Sändare och mottagare laddas i laddningsenhet.

Laddningsenheten har laddningsautomatik och kan ej överladda batterierna.



Xena Medical AB Industribyn 360 43 Åryd
Tel 0470-774484 Fax 0470-774485 www.xenamedical.se



Justering av nackset



Talförstärkaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr .Nacksetet går att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas.

Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det 3 olika storlekar stor ,normal samt liten.

Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .

Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek , Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.



Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.

Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .

Bocka enligt figuren till vänster




passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till lämplig storlek , kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .



Det är viktigt att justera bågarna så att de ej klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar även tillsammans med glasögon



Mikrofonarmen är av flexotyp och skall justeras så att mikrofonen sitter vid mungipan , sitter mikrofonen för nära munnen kan det uppstå det plåsljud när man talar .

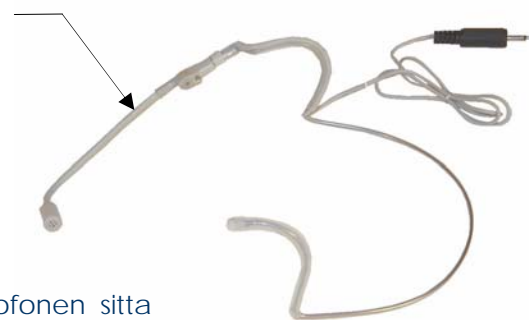

När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens placering är mycket viktig för bästa förstärkning av rösten skall erhållas