

# BRUKSANVISNING

## FÖR TALFÖRSTÄRKARE

### FLEXITAL-2 Combi



---

**Postadress**

Xena Medical AB  
Industribyn  
360 43 Åryd

**Besöksadress**

Industribyn  
Åryd

**Telefon**

0470 - 774484

**Fax**

0470 - 774485

**E-mail /Hemsida**

conny@xenamedical.se  
www.xenamedical.se



Talförstärkare Flexital- combi är en trådlös batteridrivna talförstärkare som går att koppla till hörlurar eller Högtalare .

Den består av en sändare ,mottagare och högtalarenhet ,de drivs med laddningsbara batterier . Flexital-combi är främst avsedd för att personer med svag röst .

Räckvidden är ca 100 meter ,drift tiden är ca 10 timmar

Vid laddning, anslut transformator till laddningsenhetens uttag på bakstycket. Sätt sändare resp mottagare laddningsenheten vid laddning tänds gul lysdiod när laddningen är klar tänds grön lysdiod .

Ladda högtalaren i uttaget märkt ladd se högtalarens baksida , använd laddare märkt " laddare för högtalare"

Anslut mikrofon till sändarens uttag märkt MIC använd nackset eller klädmikrofon . Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött

Anslut hörlurar eller hörsnäcka till uttag EAR på mottagaren . Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött.

Tala i mikrofonen och justera hörlurens volym till lämplig nivå med volymkontrollen på mottagaren sida.



# Mottagare ansluten till högtalare

Flexital Combi kan monteras på högtalare se fig nedan . När mottagaren monterats på högtalaren sätt då högtalarens till-från knapp i läge *till* samt sätt mottagarens till-från knapp i läge *on* .

Kontrollera att mikrofonen är monterad på sändaren samt att den är tillslagen till-från brytaren Skall stå i läge *on*.


Tala i mikrofonen och justera ljudvolymen till lämplig nivå på mottagarens volymkontroll .

Vrids volymen upp för mycket blir det lätt rundgång ”tjut” i högtalaren vrid då ner volymen för att minska rundgången .

Placera ej högtalaren för nära mikrofonen därför det uppstår lätt rundgång ”tjut” i högtalaren , det är lämpligt att ha minst 1-2 meter mellan högtalare och mikrofon för att bästa ljud skall erhållas .

Högtalaren bör laddas ca 10 tim , anslut laddaren till högtalarens uttag märkt ladd.

Montera högtalarens kontakt i mottagarens uttag märkt EAR .

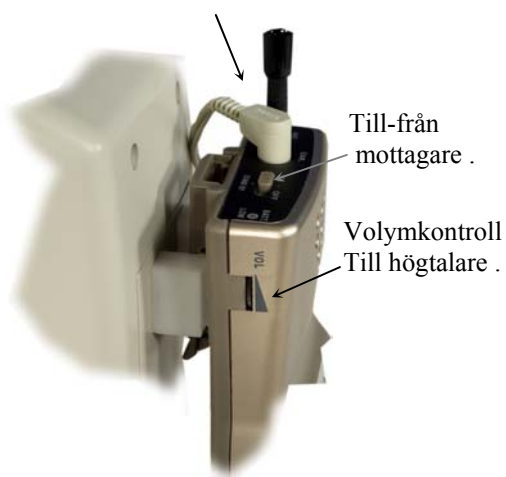

Montera mottagaren på högtalarens baksid . Mottagarens clipps passar i hållaren på Högtalarens baksida .



Flexital-combi är en flexibel trådlös talförstärkare . Mottagaren kan kopplas till hörlurar eller högtalare.

I vissa situationer kan det vara en fördel att använda hörlurar, det betyder att man kan röra sig fritt och ändå höra den röstsvege tala.

Finns det behov att flera vill lyssna samtidigt eller om det känns obekvämt att bära på hörlurarna kan mottagaren anslutas till högtalaren .

Flexital combi levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon .

Används högtalaren rekommenderas att nacksetmikrofon användes .

OBS! det finns en inbyggd mikrofon i sändaren men den har ej bra ljudkvalitet använd därför alltid extern mikrofon som ansluts till sändarens uttag märkt MIC.

Batteribyte sker genom att öppna batteriluckan på sändarens resp mottagarens baksida använd endast laddningsbara batterier godkända av Xena Medical .





## Justering av nackset



Talförstärkaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr .Nacksetet går att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas.

Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det 3 olika storlekar stor ,normal samt liten.

Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .

Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek , Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.



Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.

Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .

Bocka enligt figuren till vänster




passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till lämplig storlek , kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .



Det är viktigt att justera bågarna så att de ej klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar även tillsammans med glasögon



Mikrofonarmen är av flexityp och skall justeras så att mikrofonen sitter vid mungipan , sitter mikrofonen för nära munnen kan det uppstå det plåsljud när man talar .

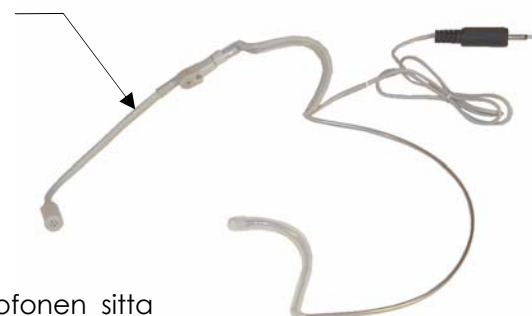

När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens placering är mycket viktig för bästa förstärkning av rösten skall erhållas