



Talförstärkare Flexital- H är en trådlös batteridriven talförstärkare/hörhjälpmedel .

Flexital-H är utvecklad för patienter med svag röst eller dålig hörsel . I många fall är det denna kombination som gör att kommunikationsproblem uppstår .

Patienten med svag röst använder sändare kopplad till nacksetmikrofon . Mottagaren ansluts till hörlurar eller hörsnäcka , volymen kan justera till lämplig nivå på mottagaren .

Man kan på detta sätt röra sig fritt i ex huset, och utan problem kommunicera med varandra oberoende av dålig hörsel och svag röst .

Mottagare ansluten till hörlur

Mikrofonen anslutes enkelt till sändaren För bästa funktion skall en nacksetmikrofon användas.

Det går även att ansluta en klädmikrofon Om rösten ej är för svag

Hörlur eller Hörsnäcka ansluts till mottagaren

Justera volymen till lämplig nivå på mottagarens volymkontroll , den sitter på vänster sida av mottagaren .

Sändare



Mottagare



Flexital-H är en flexibel trådlös talförstärkare . Mottagaren kopplas till hörlurar eller hörsnäcka.

Det går att använda flera mottagare till en sändare

Flexital - H levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon .

OBS! det finns en inbyggd mikrofon i sändaren men den har ej bra ljudkvalitet använd därför alltid extern mikrofon som ansluts till sändarens uttag märkt MIC.

Batteribyte sker genom att öppna batteriluckan på sändarens resp mottagarens baksida använd endast laddningsbara batterier godkända av Xena Medical .

Räckvidd är ca 100 meter i fri terräng .

Klädmik placeras så nära munnen som möjligt, Lämpligen i kragen




Nacksetmikrofon



Sändaren placeras lämpligtvis i byxlinningen vid behov kan antennen vikas



Hörsnäckan kan justeras Upp och ned samt vridas Se pilarna.

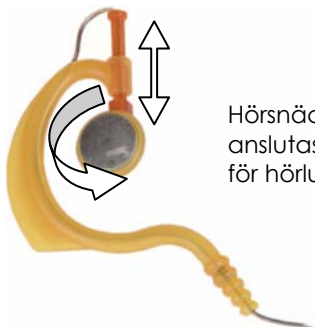

Hörsnäcka kan anslutas i stället för hörlur



Hörlur

