



Talförstärkare Flexital- H är en trådlös batteridriven Talförstärkare/ hörapparat

Den består av en sändare ,mottagare ,de drivs med laddningsbara batterier .

Flexital-H i är främst avsedd för personer med svag röst .

Sändarens antenn går att vinkla vid behov se beskrivning nedan .

Räckvidden är ca 100 meter ,drift tiden är ca 10 timmar

Vid laddning, anslut transformator till laddningsenhetens uttag på bakstycket . Sätt sändare resp mottagare laddningsenheten vid laddning tänds gul lysdiod när laddningen är klar tänds grön lysdiod .

Mottagare ansluten till hörlur

Anslut mikrofon till sändarens uttag märkt MIC använd nackset eller klädmikrofon .

Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött

Anslut hörlurar eller hörsnäcka till uttag EAR på mottagaren .

Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött.

Tala i mikrofonen och justera hörlurens volym till lämplig nivå med volymkontrollen på mottagaren sida.

Sändare

Mottagare



Mottagare ansluten till hörlur

Anslut mikrofon till sändarens uttag märkt MIC använd nackset eller klädmikrofon .
Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött

Anslut hörlurar eller hörsnäcka till uttag EAR på mottagaren .

Sätt till-från brytaren i läge on , kontrollera att batteri nivå lampan batt low ej lyser rött.


Tala i mikrofonen och justera hörlurens volym till lämplig nivå med volymkontrollen på mottagaren sida.

Ladda mottagaren i uttaget märkt LADD som sitter under volymkontrollen.



. Mottagaren anslutes till hörlurar eller hörsnäcka.

Hörsnäckan kan justeras
Upp och ned samt vridas
Se pilarna.

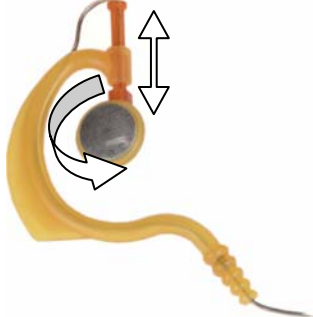

Hörsnäcka kan
anslutas i stället
för hörlur



Hörlur



XENA
MEDICAL

Industribyn 360 43 ÅRYD Tel 0470/774484 Fax 0470/774485



Justering av nackset



Sändaren levereras med ett lättvikts nackset, det väger endast 13 gr .Nacksetet går att justera det är viktigt att justera det för bästa passform. Nacksetet är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas.

Det är viktigt att det sitter bekvämt och säkert, därför finns det 3 olika storlekar stor ,normal samt liten.

Om storlek ej benämnes vid beställning levereras normalstorlek .

Passar ej levererad storlek kontakta Xena Medical för byte till lämplig storlek , Xena Medical byter kostnadsfritt vid nylevererad talförstärkare.



Tänj eller pressa ihop metalltråden för bästa passform .Bågen är tillverkad av ett fjädermaterial som ej går att bryta av . Bocka tillräckligt mycket så att den ej fjädrar tillbaka efter bockningen.

Nacksetet skall sitta säkert och bekvämt efter justeringen .

Bocka enligt figuren till vänster


passar nacksetet ej efter justering är det troligen fel storlek. Byt ut till lämplig storlek , kontakta Xena Medical för utbyte till rätt storlek .



Det är viktigt att justera bågarna så att de ej klämmer eller skaver vid örat . Nacksetet passar även tillsammans med glasögon



Mikrofonarmen är av flextyp och skall justeras så att mikrofonen sitter vid mungipan , sitter mikrofonen för nära munnen kan det uppstå det plåsljud när man talar .

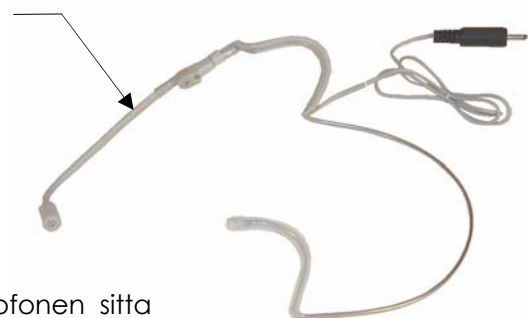

När nacksetet är rätt justerat skall mikrofonen sitta vid mungipan se figur till vänster . Mikrofonens placering är mycket viktig för bästa förstärkning av rösten skall erhållas