



Flexital- H är ett trådlöst batteridrivet hörselhjälpmedel .

Flexital-H är utvecklad för elever med auditiv perceptionsstörning eller andra koncentrationsstörningar Som ex ADHD. Det har visat sig att även elever med dyslexi har haft hjälp av denna utrustning .

Läraren bär på en sändare som är ansluten till en mikrofon. Lärarens tal överförs trådlöst till mottagaren som eleven bär .Mottagaren ansluts till hörlur eller hörsnäcka typ freestyle volymen justeras med volymratten på mottagaren . Eleven får på detta sätt en distinkt ljudöverföring från läraren . Störmoment från omgivningen minskar och koncentrationen fokuseras på lärarens röst .

Lärare:

Mikrofonen anslutes enkelt till sändaren
För bästa funktion skall en nacksetmikrofon användas.

Det går även att ansluta en klädmikrofon
Om rösten ej är för svag

Elev:

Hörlur eller Hörsnäcka ansluts till mottagaren
Justera volymen till lämplig nivå på mottagarens volymkontroll , den sitter på vänster sida av mottagaren .



Leverantör/Tillverkare

Xena Medical AB
Indusribyn
360 43 ÅRYD

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485
E Post: conny@xenamedical.se
Hemsida: www.xenamedical.se

Det går att ansluta obegränsat antal mottagare till en sändare

Sändare och mottagare har 16 olika frekvenser det medger att det går att använda 16 system samtidigt, det är således ej några problem att använda dem i angränsande klassrum utan att de stör varandra.

Det är enkelt att justera frekvensen på mottagare resp sändare det medför att man på ett enkelt sätt kan anpassa systemet utefter de behov och förutsättningar man har .

Mottagaren kan även användas till Xena's talförstärkarsystem Flexital-2 .

Flexital - H levereras med 2 st mikrofoner: nacksetmik resp klädmikrofon . Till mottagaren går det att ansluta standard hörlurar eller freestyle hörlurar som ex eleven är van att använda.

Utrustningen levereras med en laddare som har laddningsautomatik

Batteribyte sker genom att öppna batteriluckan på sändarens resp mottagarens baksida använd endast laddningsbara batterier godkända av Xena Medical .

Räckvidd är ca 100 meter i fri terräng .

Klädmik placeras så nära munnen som möjligt, Lämpligen i kragen




Nacksetmikrofon



Sändaren placeras lämpligtvis i byxlinningen vid behov kan antennen vikas



Hörsnäckan kan justeras Upp och ned samt vridas Se pilarna.

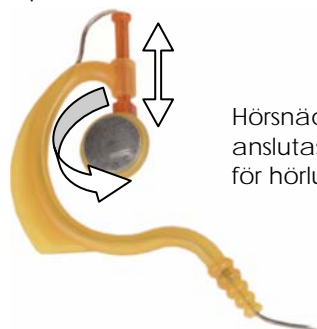

Hörsnäckan kan anslutas i stället för hörlur



Hörlur



Leverantör/Tillverkare

Xena Medical AB
Indusribyn
360 43 ÅRYD

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485
E Post: conny@xenamedical.se
Hemsida: www.xenamedical.se